

Triad[®]
Pansement Hydrophile

Une approche **Unique**

Pour la gestion des plaies

Impact sur les plaies *difficiles à panser*

Sur des surfaces humides ou irrégulières, les pansements peuvent ne pas toujours demeurer en place. Des changements fréquents de pansements pourraient entraîner:

Coûts évitables
liés à l'utilisation
de pansements
supplémentaires

Charge de travail accrue
pour les infirmières qui
doivent remplacer les
pansements

**Retard de la
cicatrisation** des
plaies influençant le
coût total des soins

Saviez-vous que?

57%

**des infirmières en soins
des plaies** voient des plaies
difficiles à panser tous les jours¹

Comment les
plaies difficiles à
panser ont-elles un
impact sur votre
établissement?



Comment *Triad*[®] fonctionne



Plaies sur des surfaces irrégulières

Triad est conçu pour être appliqué directement du tube au lit de la plaie sans avoir besoin d'un pansement secondaire.

Les surfaces irrégulières peuvent comprendre le pli inter-fessier, le coccyx, le périnée, les fesses, les aines, le visage, les mains, les pieds ainsi que d'autres parties du corps.

Triad est facile à appliquer et peut être utilisé sur le lit de la plaie ou sur la peau péri-lésionnelle.

Saviez-vous que?

64%

des lésions de pression se produisent au niveau du sacrum ou des fesses²



Dommmages de la peau liés à l'incontinence

Triad est une pâte stérile qui peut être utilisé sur une peau endommagée.

Le CMC permet au Triad d'adhérer à la peau humide, en gardant la plaie recouverte pour ainsi la protéger contre l'incontinence.

Triad contient du diméthicone pour hydrater la peau ainsi que du pétrolatum et de l'oxyde de zinc pour réduire l'irritation cutanée.

Saviez-vous que?

26%

des patients aux soins aigus souffrent d'incontinence urinaire³



Macération de la peau péri-lésionnelle

Triad est facile à utiliser sur de grandes surfaces et peut être utilisé sur le lit de la plaie et sur la peau péri-lésionnelle.

Le CMC permet au Triad d'adhérer à la peau macérée, tout en conservant la plaie recouverte et ainsi la protéger contre l'exsudat.

Triad contient du diméthicone pour hydrater la peau ainsi que du pétrolatum et de l'oxyde de zinc pour réduire l'irritation cutanée

Dans ce cas-ci, Triad a résolu une macération péri-lésionnelle étendue en 48 heures.⁵



Jour 1



Application



Jour 2

Saviez-vous que?

42%

Des plaies chroniques sont macérées⁴




Tissus nécrotiques comme les escarres sèches ou les tissus nécrotiques humides

Triad est hydrophile, ce qui signifie qu'il y a une humidité naturelle créée par le produit et elle se répartit uniformément sur la surface du lit de la plaie, maximisant le contact et créant un environnement humide.

Un environnement humide de la peau facilite le débridement autolytique, ainsi les propres enzymes du corps décomposent le tissu nécrotique

Le CMC permet au Triad d'absorber une quantité d'exsudat faible à modéré de la plaie ou des tissu dévitalisés.

Dans ce cas-ci, Triad a débridé 100% la couche épaisse de l'escarre noire en une semaine.⁶

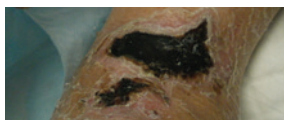

Jour 1



Jour 12



Jour 21

Saviez-vous que?

La nécrose

est une barrière qui nuit à la cicatrisation des plaies

Une approche unique

Triad® Pansement Hydrophile est une pâte stérile qui offre une approche unique dans la gestion des plaies.

Qu'utilisez-vous
actuellement pour
les plaies difficiles
à panser ?



S'applique n'importe où

Triad est facile à appliquer, directement du tube au lit de la plaie ou sur la peau péri-lésionnelle, et ce, n'importe où sur le corps.



Adhère sur la peau humide

Triad adhère sur la peau humide ou sèche et demeure bien en place, même en présence d'incontinence ou de macération.



Maintient la plaie recouverte

Triad crée un environnement humide au niveau de la plaie ce qui favorise la guérison et le débridement autolytique.



“Avec Triad, nous avons économisé considérablement et obtenu de meilleurs résultats. Nous n'avons plus besoin d'une infirmière pour faire les changements de pansement à tous les jours et ceci génère des gains significatifs sur le temps et le matériel.”

H KIRKLAND-KHYN,
Director of Wound Care, University of California, Davis, Medical Center

Triad® instructions pour visionner la vidéo:

Scannez ou textez ci-dessous pour voir la vidéo:

Scannez le code QR à l'aide de la caméra de votre téléphone intelligent. Débutez la vidéo en appuyant sur le lien qui apparaît sur votre écran (non compatible avec tous les téléphones intelligents).



Ou, textez **94253** et entrez le mot clé **“triad”** pour voir la vidéo.

Information pour les commandes

Triad® Pansement Hydrophile

Code	Size	Units
1964	2.5 oz. (71 g)	12
1967	6 oz. (170 g)	12



Sea-Clens® Nettoyant pour plaie

Un nettoyant pour les plaies à pH équilibré qui peut être utilisé pour enlever le Triad sans frotter.

Code	Size	Units
1063	6 fl. oz. (178 mL)	12
1061	12 fl. oz. (355 mL)	12



Ajoutez un nouvel outil à votre boîte à outils pour la gestion des plaies, TryTriad.com, disponible en version anglaise seulement

References

1. Online questionnaire conducted by Coloplast on 7/30/2019 with 395 healthcare professionals.
2. Bauer et al., Pressure Ulcers in the United States' Inpatient Population, Ostomy Wound Management, 2016.
3. Condon et al., Urinary and Faecal Incontinence: Point Prevalence and Predictors, IJERPH, 2019.
4. Digital survey conducted by Coloplast during Spring 2018 with 2000 healthcare professionals.
5. Mullen et al., Management of wounds with various etiologies using a hydrophilic wound dressing, WOCN, 2013.
6. Boyle et al., Using a hydrophilic wound dressing for autolytic debridement, SAWC, 2010.

Triad est seulement stérile à la première application.

Soins de stomies / Soins de d'incontinence / Soins des plaies et de la peau / Intervention Urologie

Coloplast États-Unis
Minneapolis, MN 55411 / 1-800-533-0464
www.coloplast.us

Coloplast Canada
Oakville, ON L6H 559 / 1-877-820-7005
www.coloplast.ca

Le logo de Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S.
© 2020 Coloplast Corp. Tous droits réservés.

