

Pansement hydrophile

Triad®

Une approche unique pour les plaies difficiles à panser

Triad est une pâte stérile qui s'applique n'importe où et qui adhère à la peau humide et maintient la plaie recouverte.



Plaies sur des surfaces irrégulières



Lésions cutanées reliées à l'incontinence



Macération de la peau périlésionnelle




Tissus nécrotiques comme les escarres sèches ou les tissus nécrotiques humides.

Application de triad :



1. Nettoyez toujours la plaie avant d'appliquer Triad.

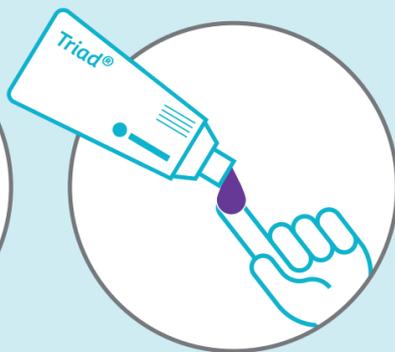

2. Triad peut être appliqué directement à partir du tube ou à l'aide d'un doigt ganté stérile ou d'un abaisse langue stérile.



3. Appliquez uniformément et délicatement le Triad jusqu'à l'épaisseur d'une pièce de dix cent sur la zone à traiter.


Parce que Triad est conçu pour être utilisé sur des surfaces humides et irrégulières, il est généralement utilisé sans pansement secondaire.

Il arrive que Triad ne sèche pas complètement et tache légèrement la literie ou les vêtements.

Triad peut être laissé en place jusqu'à 7 jours, mais devra être appliqué à nouveau au besoin si présence d'exsudat plus abondant.

Pour la région du périnée, appliquez Triad de nouveau après chaque épisode d'incontinence. Il n'est pas nécessaire de retirer Triad complètement avant chaque nouvelle application.

Retrait de Triad :

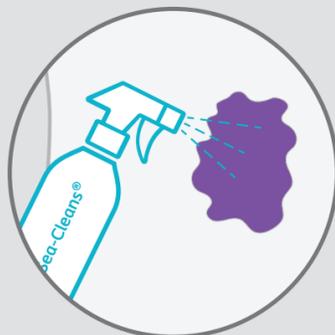

1. Utilisez un nettoyant pour plaies au pH équilibré afin de d'humidifier le Triad.



2. À l'aide de compresses sèches, essuyez doucement (sans frotter) pour enlever le Triad




3. Répétez au besoin pour éliminer tout résidu.

Jouez au jeu éducatif de Triad

Essayez le jeu pour voir des exemples de plaies pour lesquelles Triad est indiqué. Vous apprendrez rapidement et facilement comment appliquer et enlever Triad!

Scannez pour commencer.

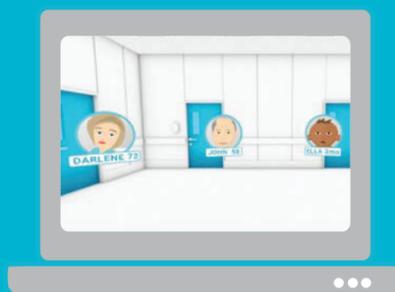

Vidéo sur le mode d'emploi de Triad

Scannez pour voir la vidéo.



Renseignements de commande

Triad® Pansement hydrophile

Code	Taille	Unités
1964	2,5 oz. (71 g)	12
1967	6 oz. (170 g)	12



Sea-Cleans® Nettoyant pour plaies

Un nettoyant pour plaies au pH équilibré peut être utilisé pour retirer Triad sans frotter.

Code	Taille	Unités
1063	6 fl. oz. (178 mL)	12
1067	12 fl. oz. (355 mL)	12



Triad est seulement stérile à la première application. Lire le mode d'emploi complet du produit et tenir compte des indications.

Soins de stomie / Soins de continence / Soins des plaies et de la peau / Soins d'urologie

Coloplast United States
Minneapolis, N 55411 / 1-800-533-0464
www.coloplast.us

Coloplast Canada
Oakville, ON L6H 5S9 / 1-877-820-7005
www.coloplast.ca

Le logo Coloplast est une marque de commerce déposée de Coloplast A/S.
© 2022 Coloplast Corp. Tous droits réservés.



PM-10836 03.20 F0519N